

KINDotoClean: von Anfang an die beste Wahl.

KIND

Optimale Pflege in kindgerechter Aufmachung.

KINDotoClean Reinigungs-System Junior für HdO-Hörgeräte

mit Reinigungs-Kapseln, Reinigungs-Becher und Trocken-Puster – die praktische Kombi-Lösung für Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte von Kindern!
Bei KIND zum günstigsten Set-Preis!



Sieben praktische Tipps von Ihrem KIND Hörgeräte-Akustiker.


So haben Sie lange Freude an Ihren Hörgeräten:

- Schützen Sie Ihre Hörgeräte nach Möglichkeit vor Feuchtigkeit.
- Tragen Sie sie nicht beim Duschen und vermeiden Sie Kontakt mit Haarspray.
- Trocknen Sie Ihre Hörgeräte täglich.
- Reinigen Sie Ihre Hörgeräte regelmäßig. Bei Hinter-dem-Ohr-Hörgeräten sollten Sie dazu das Maßrohrstück vom Hörgerät trennen und beides separat reinigen.
- Verwenden Sie zur Pflege Ihrer Hörgeräte nur Mittel, die ausdrücklich dafür empfohlen sind.
- Wenn Sie Ihre Hörgeräte nicht tragen, zum Beispiel nachts, sollten Sie sie in einem stabilen Etui aufbewahren.
- Lassen Sie Ihre Hörgeräte regelmäßig von Ihrem KIND Hörgeräte-Akustiker überprüfen – dieser Service ist bei KIND kostenlos für Sie.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern zu Ihrem individuellen KINDotoClean Pflege-System.

Wir sind für Sie da:

KIND ist mit über 460 Fachgeschäften einer der führenden Hörgeräte-Akustiker Europas. KIND Fachgeschäfte finden Sie auch in vielen anderen Ländern. Mehr Infos unter www.kind.com

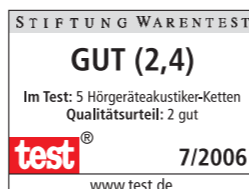

Deutschland: KIND Hörgeräte • Kokenhorststraße 3–5 • 30938 Großburgwedel/Hannover • Telefon (0 51 39) 80 85-0 • Fax (0 51 39) 80 85-299 • info@kind.com
Schweiz: KIND Hörzentralen • Hertensteinstrasse 8 • 6004 Luzern • Telefon 041 418 70 70 • Fax 041 418 70 71 • info.ch@kind.com
Österreich: KIND Hörgeräte • Hoher Markt 1/3/5 • 1010 Wien • Telefon 01 535 19 31 • Fax 01 533 31 39 • info.at@kind.com

Willkommen bei KIND.

„KINDotoClean: Pflege und Hygiene mit System.“

KIND



Auf Ihre Hörgeräte sollen Sie sich in jeder Situation verlassen können.

Durch gute Pflege erhalten Sie die Leistung Ihrer Hörgeräte und beugen Reparaturen vor. Mit den bewährten KINDotoClean Pflegemitteln gelingt das sicher und leicht.

Ihr KIND Hörgeräte-Akustiker berät Sie gern ausführlich dazu und empfiehlt Ihnen speziell auf Ihren Hörgeräte-Typ abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel aus dem umfangreichen KINDotoClean Programm.

KIND. Gemeinsam für besseres Hören.

KINDotoClean: das optimale Pflege-Programm für alle KIND Hörgeräte.

KIND

Hygienisch reinigen mit KINDotoClean.

KINDotoClean Reinigungstücher

Die KINDotoClean Reinigungstücher sind bereits mit einer speziellen Reinigungstinktur präpariert. KINDotoClean Reinigungstücher eignen sich für Hinter-dem-Ohr- oder Im-Ohr-Hörgeräte und sind ideal für unterwegs und auf Reisen.



KINDotoClean Reinigungs-Spray

Das KINDotoClean Reinigungs-Spray ist ideal geeignet für die schnelle und komfortable Reinigung Ihrer Hinter-dem-Ohr oder Im-Ohr-Hörgeräte.



KINDotoClean Reinigungs-Tabs und Reinigungs-Becher

Das optimale Reinigungs-System speziell für Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte: Trennen Sie dazu die Maßrohrstücke von Ihren Hörgeräten und legen Sie sie zusammen mit den KINDotoClean Reinigungs-Tabs in den KINDotoClean Reinigungs-Becher. Der Aktiv-Sauerstoff sorgt für eine besonders wirksame Reinigung.



KINDotoClean IO-Pflege-System

beinhaltet Trocken-Kapseln, Trocken-Becher und Reinigungs-Spray.



KINDotoClean HdO-Pflege-System

mit Reinigungs-Tabs, Reinigungs-Becher und Trocken-Puster.



KINDotoClean HdO-Kombi-System

Das Komplettpaket für die Pflege Ihres Hinter-dem-Ohr-Hörgerätes, enthält alles für eine optimale Erstausrüstung: Reinigungs-Becher, -Tabs und -Spray sowie Trocken-Puster, -Becher und -Kapseln.



Zuverlässig trocknen mit KINDotoClean.

KINDotoClean Trocken-Etui

Trocknen und Schützen in einem: in nur 3 Stunden werden Hinter-dem-Ohr- oder Im-Ohr-Hörgeräte sanft und sicher getrocknet – die praktische Lösung für komfortables und sicheres Trocknen über Nacht und auf Reisen.



KINDotoClean Trocken-Kissen

Schnell und wirkungsvoll: Das elektrische Trocken-Kissen lässt Feuchtigkeit an und in Ihren Hörgeräten gleichmäßig verdunsten.



KINDotoClean Trocken-Kapseln und Trocken-Becher

Geben Sie eine KINDotoClean Trocken-Kapsel zusammen mit Ihren Im-Ohr- oder Hinter-dem-Ohr-Hörgeräten in den Trocken-Becher. Über Nacht entzieht die Trocken-Kapsel den Hörgeräten die Feuchtigkeit.



KINDotoClean Trocken-Puster

Mit dem KINDotoClean Trocken-Puster entfernen Sie zuverlässig Flüssigkeitsreste aus den Schallschläuchen und den Bohrungen Ihrer Maßrohrstücke.



KINDotoClean Tasche

zur praktischen Aufbewahrung Ihrer Reinigungs- und Pflegemittel – auch auf Reisen.



Neu: auch als Kombi-Angebot!

KINDstartKombi: Pflege-System plus KINDotoClean Tasche, KIND Batterie-Tester und 2 Packungen KIND Hörgeräte-Batterien.

KINDprofikombi: Pflege-System plus KINDotoClean Tasche und KIND Batterie-Tester.

KIND. Gemeinsam für besseres Hören.